

ALLGEMEINE HINWEISE

- Dieser Test darf NICHT durchgeführt werden, wenn Du in den letzten 14 Tagen Symptome einer COVID-19 gezeigt hast oder in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu einer positiv getesteten Person standest. In diesen Fällen wende Dich bitte an Deinen Arzt, bevor Du diesen Test durchführst.
- Dieser Test darf NICHT von Personen unter 18 Jahren durchgeführt werden.
- Die Blutentnahme darf NICHT durchgeführt werden, wenn eine durch Blut übertragbare Krankheit wie HIV oder Hepatitis vorliegt.
- Wasche Dir vor der Testdurchführung mindestens 30 Sekunden lang die Hände unter warmem Wasser mit Seife.
- Verwende jede Lanzette nur einmal und gib sie unter keinen Umständen an andere Personen weiter.
- Achte während der Testdurchführung auf eine saubere Umgebung.
- Sende Deine Blutprobe am Tag der Probenentnahme an das Labor. Kann die Probe erst am Folgetag versendet werden, bewahre die Probe im Kühlschrank auf. Beachte, dass die Probe keinen Temperaturen über 25°C und unter 0°C ausgesetzt werden darf.
- Entsorge die Utensilien sicher und ordnungsgemäß über den Restmüll, insbesondere die Lanzetten.

KONTAKT

Kontaktiere uns gerne, wenn Du Fragen oder Anmerkungen hast. Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Telefonnummer: +49 (0)30 914 907 39
E-Mail: support@lykon.de

Verantwortlicher für die Behandlungseinheit:
LykonDX GmbH
Schwedter Str. 36 A
D-10435 Berlin

Lykon.de

Hersteller	Komponente	CE
NOBAMED Paul Danz AG Höltkenstraße 1-5 D - 583000 Wetter/Ruhr	Pflaster	CE
Lohnmann & Rauscher GmbH Irlicher Straße 55 D - 56567 Neuwied	Zelletten	CE
Vivomed LTD Brannish Road UK - Downpatrick BT30 6LL	Desinfektionstuch	CE
Becton Dickinson Tullastraße 8-12 D - 69126 Heidelberg	Lanzette	CE0050
Becton Dickinson Tullastraße 8-12 D - 69126 Heidelberg	Microtainer-Röhrchen	CE



Nicht wiederverwenden



Verwendbar bis



In-Vitro Diagnostikum



Lanzette sterilisiert durch Bestrahlung



Chargennummer



Gebrauchsanwendung beachten



Temperaturobergrenze

COVID-19 (Slim Box) DE-201127_Digital_v01

HALLO!

BITTE LIES
DIESE ANLEITUNG
AUFMERKSAM DURCH,
BEVOR DU MIT
DEM TEST BEGINNST.

1. REGISTRIERE
DEINEN TEST ONLINE




Wir können Deine Ergebnisse nur verarbeiten, wenn Du die Test ID Deines Tests mit Deinem Account verbindest.

Wenn Du den Test nicht registrierst oder die Test ID verlierst, wirst Du Deine Ergebnisse nicht erhalten können.

- Besuche **dashboard.lykon.de** und logge **Dich mit Deinen Zugangsdaten ein**, oder **erstelle einen neuen Account**.
- **Verbinde Deinen Account** mit Deiner **Test ID**. Deine Test ID findest Du auf dem oberen Abschnitt des beiliegenden Formular-Bogens.

F

DIE KOMPONENTEN

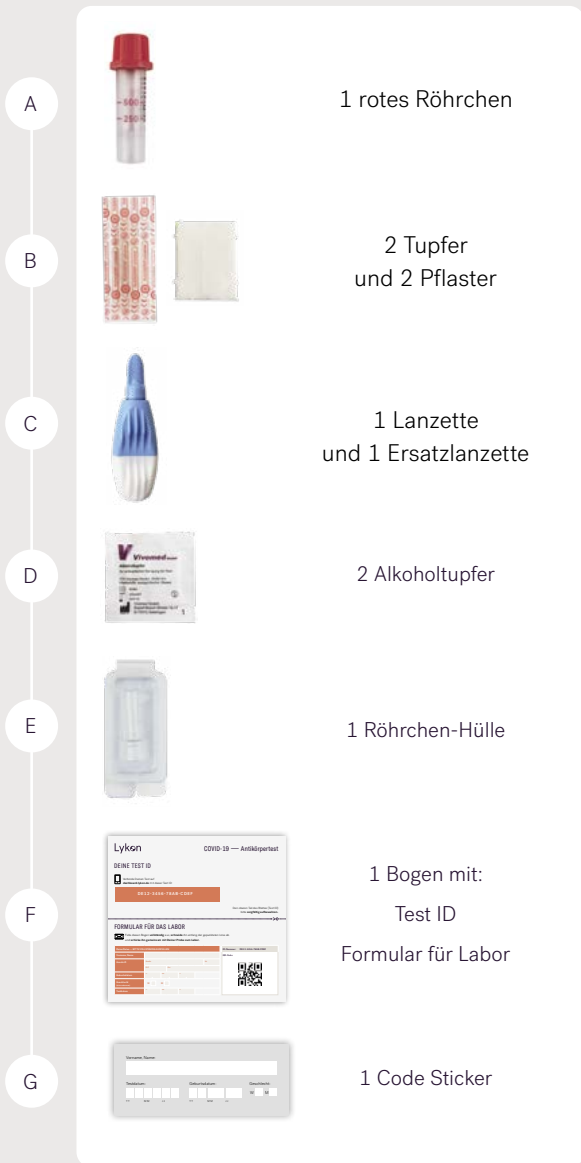

BEACHT
FOLGENDE TEST-
VORAUSSETZUNGEN,
BEVOR ES LOS GEHT:

- Führe diesen Test nur durch, wenn Du in den letzten 14 Tagen
 - **KEINE Symptome** einer COVID-19 gezeigt hast
 - **KEINEN Kontakt** zu einer positiv auf COVID-19 getesteten Person hattest.
- Wasche Dir vor der Testdurchführung **mindestens 30 Sekunden** lang die Hände unter **warmem Wasser mit Seife**.
- Achte während der Testdurchführung auf eine **saubere Umgebung**.
- Plane etwa **30 Minuten** für den Test ein.
- **Sende** Deine Probe noch **am selben Tag** an uns zurück, stelle also sicher, dass die Post geöffnet hat.
- **Lese diese Anleitung genau** und stelle sicher, dass Du jeden Schritt der Anleitung befolgst, damit wir Deine Blutprobe analysieren können.

2. FÜHRE DEN BLUTTEST DURCH



Achte darauf, dass Du Schritt 1 durchgeführt und Dein Test online registriert hast!
Falls das nicht der Fall ist, starte mit Schritt 1.
Bevor Du mit dem Test beginnst, **wasche Dir mindestens 30 Sekunden lang die Hände unter warmem Wasser mit Seife.**

2.1 Komponenten auslegen

Lege die Komponenten aus der Box in der richtigen Reihenfolge, wie auf der vorigen Seite aufgeführt, aus.

2.2 Test vorbereiten

Lies die folgenden Anweisungen sorgsam, bevor Du die nächsten Schritte ausführst. Sobald Du Deinen Finger gepikst hast und er zu bluten beginnt, wirst Du dazu keine Zeit haben.

- Entferne die Kappe und stecke das **Röhrchen in den Halter der Röhrchen-Hülle.**

A E



- Bereite ein **Pflaster** vor.

B



- Halte Deine nicht-dominante Hand für min. **2 Minuten in einen Behälter mit warmem Wasser (z.B. eine Spüle oder große Schüssel).** Stelle sicher, dass die ganze Hand unter Wasser ist.
Achtung: Eine gut durchblutete Hand ist notwendig, um einen ausreichenden Blutfluss sicherzustellen.



- Entferne die Kappe der Lanzette durch Drehen.

C



- Reinige** den Ringfinger Deiner **nicht-dominanten Hand** mit einem Alkohol-tupfer und lasse ihn **10 Sekunden lang trocknen.**

D



2.3 Blut abnehmen

Das **rote Röhrchen** muss **bis zur 250-Line** gefüllt werden.

- Stehe auf** und lege Deine Hand **wie abgebildet** auf den Tisch.



- Drücke nun die Lanzette **seitlich auf die Ringfingerspitze.**

C



- Wische den **ersten Tropfen Blut mit einem Tupfer ab.**

B



- Halte Deine gestreckte Hand **über das Röhrchen, um Dein Blut aufzufangen.** Die Fingerspitze **zeigt dabei nach unten auf das Röhrchen.**

A E



- Massiere Deine Hand **von der Handfläche beginnend fest in Richtung Fingerspitze.** Achte darauf, dass Du **nicht über den Einstich** streichst. Warte 5 Sekunden bis Du die Bewegung wiederholst.



- Achte darauf, dass Du das **Röhrchen bis zur 250-Linie** füllst.
- Falls der Blutfluss stoppt, verbinde Deinen Finger und wiederhole diesen Prozess mit Deinem Mittelfinger, bis die Füllhöhe erreicht ist.

B



- Drücke die **Kappe wieder auf das Röhrchen bis es klickt.**



3. BESCHRIFTE UND SICHERE DEINE BLUTPROBE



Die Probe kann nur analysiert werden, wenn das Röhrchen korrekt und vollständig beschriftet ist!

- Schneide den beiliegenden Bogen mit Deiner **Test ID** und dem **Formular für das Labor** wie markiert in zwei Hälften.
- Fülle das Formular wie beschrieben aus.**

F



- Fülle den **Code Sticker für das Röhrchen** wie beschrieben aus.

G



- Beklebe das Röhrchen** mit einem **ausgefüllten Code-Sticker.**

ACHTUNG: Klebe dabei die **überstehenden Enden** an der haftenden Seite aneinander. **Der Text darf nicht überklebt werden!**



- Lege das Röhrchen **in die Röhrchenhülle** und verschließe diese. Hierbei kann der überstehende Sticker etwas aus der Hülle ragen – dies ist kein Problem!

E



4. VERSENDE DEINE BLUTPROBE



- Lege die **Hülle mit dem Röhrchen** und das **ausgefüllte Formular** in den beiliegenden **Umschlag.**
- Verschließe den Umschlag und bringe ihn **noch am gleichen Tag** zum Briefkasten.
- Wenn es **draußen friert oder die Temperaturen über 25°C liegen**, gib den Umschlag bitte **direkt bei der Poststelle ab.**

A E F

5. ERHALTE DEINE ERGEBNISSE

- Wir benachrichtigen Dich**, sobald Deine Ergebnisse vorliegen. Diese kannst Du dann in Deinem Nutzerkonto auf **dashboard.lykon.de** abrufen.
- Erfahre mehr auf **Lykon.de**